

Informacje o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa poduszek ortopedycznych i przeciwoleżynowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

- * Upewnij się, że poduszka jest odpowiednio dobrana do wagi i wzrostu użytkownika, aby zapewnić właściwe wsparcie i uniknąć dyskomfortu lub urazów.
- * Regularnie sprawdzaj poduszkę pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia, przetarcia lub deformacje. Nie używaj uszkodzonej poduszki, ponieważ może to zmniejszyć jej skuteczność i stanowić zagrożenie dla zdrowia.
- * Poduszki przeciwoleżynowe wymagają regularnej kontroli ciśnienia powietrza lub poziomu płynu (w zależności od typu poduszki). Niewłaściwe ciśnienie może prowadzić do powstawania odleżyn lub zwiększać ryzyko upadku.
- * Poduszki z funkcją podgrzewania powinny być używane ostrożnie, zgodnie z instrukcją producenta. Zbyt wysoka temperatura może spowodować oparzenia skóry.
- * Utrzymuj poduszkę w czystości, regularnie ją wietrz i pierz (jeśli jest to możliwe). Zanieczyszczona poduszka może stać się siedliskiem bakterii i grzybów, co zwiększa ryzyko infekcji skórnych.
- * Unikaj stosowania silnych detergentów lub środków czyszczących, które mogą uszkodzić materiał poduszki lub powodować podrażnienia skóry.
- * Poduszki ortopedyczne i przeciwoleżynowe powinny być używane zgodnie z zaleceniami lekarza lub fizjoterapeuty. Niewłaściwe użytkowanie może pogorszyć stan zdrowia.
- * Poduszki przechowuj w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- * Upewnij się, że poduszka jest stabilnie umieszczona na krześle, wózku inwalidzkim lub łóżku. Niestabilna poduszka może zwiększać ryzyko upadku.
- * Regularnie zmieniaj pozycję ciała, aby zmniejszyć nacisk na jedną partię ciała i zapobiec powstawaniu odleżyn.
- * W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów skórnych (np. zaczerwienienia, podrażnienia, pęcherze) natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
- * Jeśli poduszka zawiera małe elementy (np. granulki styropianowe), przechowuj ją w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć ryzyka połknięcia i zadławienia.
- * Osoby z ograniczoną mobilnością lub zaburzeniami czucia powinny regularnie sprawdzać stan skóry pod poduszką, aby wcześniej wykryć ewentualne problemy.

* Nie używaj poduszki w pobliżu otwartego ognia lub źródeł wysokiej temperatury, aby uniknąć ryzyka pożaru.

* Osoby uczulone na materiały, z których wykonana jest poduszka, powinny unikać jej stosowania.

* Zwracaj uwagę na wszelkie zmiany w komforcie użytkowania poduszki. Jeśli zauważysz, że poduszka przestała zapewniać odpowiednie wsparcie lub komfort, wymień ją na nową.

* W przypadku poduszek elektrycznych, zawsze odłączaj poduszkę od zasilania przed czyszczeniem i upewnij się, że poduszka jest całkowicie sucha przed ponownym użyciem.