

# BOWi

## Instrukcja użytkowania - Poduszka na oparcie wózka inwalidzkiego

### 1. Przeznaczenie

Poduszka na wózek inwalidzki została zaprojektowana w celu zwiększenia komfortu użytkowania oraz poprawy podparcia pleców podczas siedzenia. Produkt składa się z dwóch oddzielnych elementów: wypełnienia oraz pokrowca, które użytkownik musi samodzielnie połączyć przed pierwszym użyciem.

### 3. Budowa produktu

Poduszka składa się z:

- wypełnienia,
- zdejmowalnego pokrowca ochronnego wyposażonego w zakładkę umożliwiającą zamknięcie bez użycia zamka błyskawicznego.

**Uwaga:** Elementy są zapakowane oddzielnie.

### 4. Sposób użycia

#### 4.1 Przygotowanie

1. Wyjmij oba elementy z opakowania.
2. Sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony.
1. Otwórz pokrowiec, odchylając zakładkę, Chwyć wypełnienie i delikatnie złóż je (jeśli to konieczne), aby ułatwić włożenie.
2. Wsuń wypełnienie do wnętrza pokrowca, upewniając się, że wypełnia ono równomiernie całą powierzchnię.
3. Rozprostuj wypełnienie wewnątrz pokrowca tak, aby nie było zagnieceń ani przesunięć.
4. Zamknij pokrowiec, nakładając zakładkę na otwór.

#### 4.2 Umieszczenie na wózku

1. Połóż poduszkę na oparciu wózka.
2. Upewnij się, że strona użytkowa (gładka) jest skierowana na zewnątrz.
3. Naciągnij taśmy mocujące znajdujące się z tyłu poduszki i zaczepl je o oparcie wózka, aby stabilnie utrzymać poduszkę we właściwej pozycji.
4. Upewnij się, że poduszka jest prawidłowo zamocowana i nie przesuwa się.

### 4.3 Użytkowanie

- Oprzyj plecy równomiernie o powierzchnię poduszki.
- W razie potrzeby popraw położenie poduszki, aby zapewnić wygodne i stabilne podparcie.
- Regularnie kontroluj, czy poduszka nie przesuwa się podczas użytkowania.

### 6. Czyszczenie i konserwacja

- Pokrowiec i wypełnienie można prać ręcznie lub w pralce w temperaturze do 40°C.
- Nie używać silnych detergentów ani wybielaczy.
- Dokładnie wysuszyć przed ponownym użyciem.

### 7. Środki ostrożności

- Nie używać uszkodzonej poduszki.
- Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury.
- Regularnie sprawdzać stan techniczny.

### 8. Przechowywanie

- Przechowywać w suchym i czystym miejscu.
- Chronić przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

**Uwaga:** Poduszka poprawia komfort siedzenia i podparcie pleców, jednak nie zastępuje prawidłowej pozycji siedzącej ani zaleceń lekarza lub fizjoterapeuty.

**Wyprodukowano w Polsce.**

**Producent:**

Bowi-Styl  
ul. Kaczeńcowa 16  
91-214 Łódź

[www.bowi.pl](http://www.bowi.pl),  
[info@bowistyl.pl](mailto:info@bowistyl.pl), tel. 661 508 700