

BOWi

Instrukcja użytkowania - Poduszka na siedzisko wózka inwalidzkiego

1. Przeznaczenie

Poduszka na wózek inwalidzki została zaprojektowana w celu zwiększenia komfortu siedzenia oraz zmniejszenia ryzyka powstawania odleżyn. Może być stosowana zarówno przez użytkowników aktywnych, jak i osoby spędzające dłuższy czas w pozycji siedzącej. Produkt składa się z dwóch oddzielnych elementów: wypełnienia oraz pokrowca, które użytkownik musi samodzielnie połączyć przed pierwszym użyciem.

3. Budowa produktu

Poduszka składa się z:

- wypełnienia,
- zdejmowalnego pokrowca ochronnego wyposażonego w zakładkę umożliwiającą zamknięcie bez użycia zamka błyskawicznego.

Uwaga: Elementy są zapakowane oddzielnie.

4. Sposób użycia

4.1 Przygotowanie

1. Wyjmij oba elementy z opakowania.
2. Sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony.
1. Otwórz pokrowiec, odchylając zakładkę, Chwyć wypełnienie i delikatnie złóż je, aby ułatwić włożenie.
2. Wsuń wypełnienie do wnętrza pokrowca, upewniając się, że wypełnia ono równomiernie całą powierzchnię.
3. Rozprostuj wypełnienie wewnątrz pokrowca tak, aby nie było zagnieceń ani przesunięć.
4. Zamknij pokrowiec, nakładając zakładkę na otwór.

4.2 Umieszczenie na wózku

1. Połóż poduszkę na siedzisku wózka.
2. Upewnij się, że strona użytkowa (gładka) jest skierowana do góry.
3. Wyrównaj poduszkę, aby była stabilna i nie przesuwała się.

4.3 Użytkowanie

- Usiądź na poduszce równomiernie rozkładając ciężar ciała.
- Upewnij się, że biodra są dobrze podparte.
- W razie potrzeby skoryguj pozycję poduszki.

6. Czyszczenie i konserwacja

- Pokrowiec i wypełnienie można prać ręcznie lub w pralce w temperaturze do 40°C.
- Nie używać silnych detergentów ani wybielaczy.
- Dokładnie wysuszyć przed ponownym użyciem.

7. Środki ostrożności

- Nie używać uszkodzonej poduszki.
- Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury.
- Regularnie sprawdzać stan techniczny.

8. Przechowywanie

- Przechowywać w suchym i czystym miejscu.
- Chronić przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Uwaga: Regularne stosowanie poduszki wspomaga profilaktykę odleżyn, jednak nie zastępuje zmiany pozycji ciała i odpowiedniej opieki medycznej.

Wyprodukowano w Polsce.

Producent:

Bowi-Styl

ul. Kaczeńcowa 16

91-214 Łódź

www.bowi.pl,

info@bowistyl.pl, tel. 661 508 700