

BOWi

Instrukcja użytkowania maty przeciwoodleżynowej (wersja bez – bez taśm mocujących)

1. Przeznaczenie produktu

Mata przeznaczona jest do poprawy komfortu leżenia i profilaktyki odleżyn. Dzięki elastycznej strukturze pomaga równomiernie rozłożyć nacisk ciała. Mata nie posiada taśm mocujących – utrzymuje się na miejscu dzięki odpowiedniemu ułożeniu i prześcieradłu.

2. Użytkowanie

- Wyjmij matę z opakowania i rozłóż ją na płasko.
- Ułóż matę na materacu – stroną użytkową do góry.
- Wycentrum matę tak, aby nie wystawała poza krawędzie łóżka.
- Przykryj matę dobrze naciągniętym prześcieradłem (najlepiej z gumką).
- Wygładź powierzchnię – mata powinna leżeć równo, bez fałd.

3. Najważniejsze zasady

- Używaj maty zawsze na materacu (nie bezpośrednio na twardej powierzchni).
- Mata nie powinna się przesuwac ani zwiżać.
- Nie układaj kilku mat jedna na drugiej.
- Nie zakrywaj jej folią ani materiałami, które blokują przepływ powietrza.
- Dzieci i osoby wymagające opieki powinny korzystać z maty pod nadzorem.
- Używaj tylko suchej maty.

4. Czyszczenie i pielęgnacja

- Prać w temperaturze do 60°C.
- Nie używać chloru ani chemicznego czyszczenia.
- Suszyć w pozycji rozłożonej lub pionowo.

5. Przechowywanie

- Przechowuj w suchym miejscu.
- Chronić przed wilgocią i bezpośrednim światłem słonecznym.
- Przechowywać i transportować najlepiej w formie zwiniętej.

6. Utylizacja

Zużyta matę wyrzucić do odpadów z tworzyw sztucznych zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wyprodukowano w Polsce.

Producent:

Bowi-Styl Sp. z o.o., ul. Kaczeńcowa 16, 91-214 Łódź,
www.bowi.pl, info@bowistyl.pl, tel. 661 508 700