



## Instrukcja użytkowania - Pokrowiec na poduszkę do wózka inwalidzkiego

### 1. Przeznaczenie

Pokrowiec przeznaczony jest do stosowania z poduszkami do wózków inwalidzkich. Produkt chroni poduszkę przed zabrudzeniami oraz zwiększa komfort użytkowania dzięki zastosowaniu oddychającej dzianiny 3D.

### 2. Materiał

Pokrowiec wykonany jest z oddychającej dzianiny 3D. Materiał wspomaga cyrkulację powietrza i poprawia komfort użytkowania podczas długotrwałego siedzenia.

### 3. Warianty produktu

Pokrowce dostępne są w dwóch wariantach zamknięcia:

- zamknięcie na zakładkę,
- zamknięcie na suwak.

Sposób użytkowania zależy od wybranego wariantu.

### 4. Zakładanie pokrowca

#### 4.1 Wariant z zakładką

1. Otwórz pokrowiec poprzez odchylenie zakładki.
2. Wsuń wypełnienie poduszki do wnętrza pokrowca.
3. Rozprowadź wypełnienie równomiernie wewnątrz pokrowca.
4. Zamknij pokrowiec, nakładając zakładkę na otwór.

#### 4.2 Wariant z suwakiem

1. Otwórz suwak pokrowca.
2. Wsuń wypełnienie poduszki do wnętrza pokrowca.
3. Upewnij się, że wypełnienie jest prawidłowo ułożone.
4. Zamknij suwak do końca.

### 5. Użytkowanie

- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzać stan pokrowca oraz poprawność jego założenia.
- Nie używać uszkodzonego pokrowca.

## 6. Czyszczenie i konserwacja

- Pokrowiec można prać w temperaturze do 40°C.
- Nie prasować.
- Nie stosować wybielaczy ani silnych detergentów.
- Nie czyścić chemicznie.
- Suszyć w naturalny sposób, z dala od źródeł wysokiej temperatury.
- Przed praniem wariantu z suwakiem zaleca się zamknięcie suwaka.

## 7. Środki ostrożności

- Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury.
- Regularnie sprawdzać stan techniczny.
- Nie używać pokrowca w przypadku widocznych uszkodzeń materiału lub zamknięcia.

## 8. Przechowywanie

- Przechowywać w suchym i czystym miejscu.
- Chronić przed wilgocią oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

**Wyprodukowano w Polsce.**

**Producent:**

Bowi-Styl

ul. Kaczeńcowa 16

91-214 Łódź

[www.bowi.pl](http://www.bowi.pl),

[info@bowistyl.pl](mailto:info@bowistyl.pl), tel. 661 508 700